

Cortrium C3+ App

Gebrauchsanweisung



1. Bluetooth Modus des C3+ Holter Monitors einschalten..... 2
2. Cortrium C3+ App öffnen 3
3. C3+ Holter Monitor mit der App verbinden..... 3

Die Cortrium C3+App dient nur zur Visualisierung der Signalqualität. Bitte beachten Sie, dass diese App nicht in der Lage ist, das Signal zu analysieren und nicht für direkte diagnostische Auswertungen verwendet werden sollte. Bitte verwenden Sie die auf dem C3+ gespeicherten Daten zur Interpretation und Analyse.

Sie können die App "Cortrium C3+" im Apple oder Google Play Store herunterladen.

1. Bluetooth Modus des C3+ Holter Monitors einschalten

Um den C3+ Holter Monitor mit der iOS-App zu verwenden, müssen Sie Ihr C3+ zunächst mit einem einfachen Knopfdruck einschalten. Drücken Sie nun zweimal hintereinander um den Bluetooth Modus einzuschalten. Das Gerät blinkt jetzt blau.

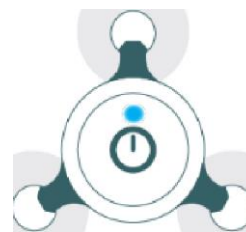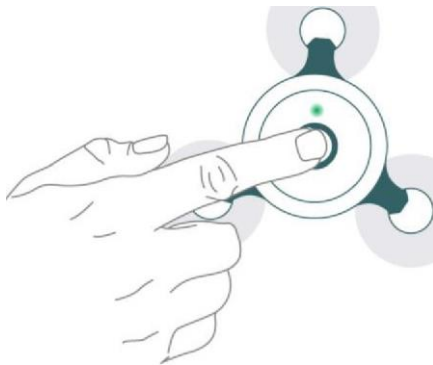

●	Einmaliges Drücken	Gerät einschalten
---	--------------------	-------------------

● ●	Zweimal drücken	Bluetooth einschalten
-----	-----------------	-----------------------


2. Cortrium C3+ App öffnen

Klicken Sie auf das Cortrium C3+ App-Symbol, um die App zu öffnen.



3. C3+ Holter Monitor mit der App verbinden

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Connect" in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.

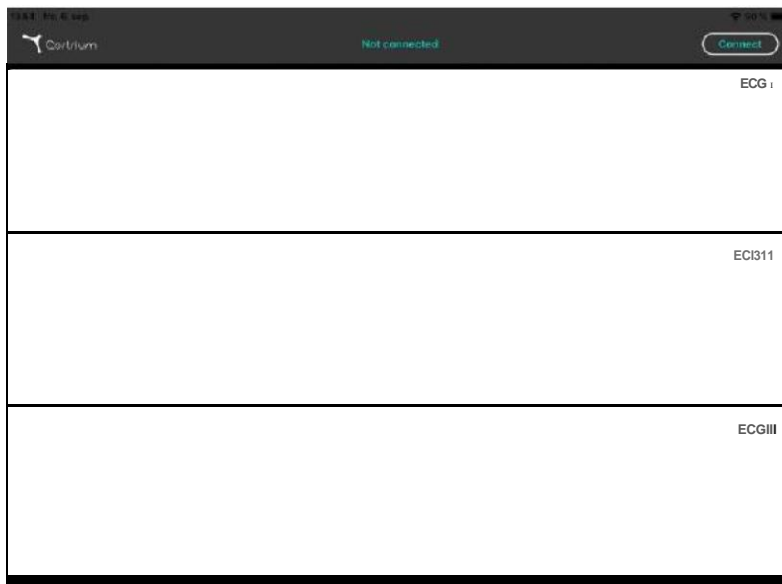

Wählen Sie das aufgelistete C3+ Gerät aus oder brechen Sie das Pairing ab.



Wenn das Gerät auf der Brust des Patienten angebracht ist, erscheint das EKG nun auf dem Bildschirm. Um die Verbindung zu trennen, betätigen Sie die Schaltfläche "Disconnect" (Trennen).



Der Bluetooth Modus des C3+ Holter Monitors schaltet sich nach 10 Minuten automatisch ab. Um den Bluetooth Modus vorher auszuschalten, drücken Sie zweimal hintereinander auf den Druckknopf des Geräts. Das Gerät blinkt nun langsam grün und zeichnet weiterhin auf.